

器74 医薬品注入器 歯科用薬剤注入器 JMDN 70387000  
器47 注射針及び穿刺針 歯科用貼薬針 JMDN 70679000

一般医療機器

# デントジェクト Dentject


再使用禁止：ノズル

## 【禁忌・禁止】

ノズルは再使用しないこと。

## ※【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

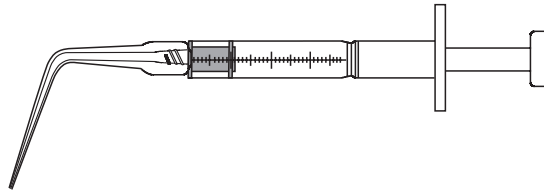

材質：ポリプロピレン

【原理】

本機器はノズル交換型注入器で、吸引した薬剤をプランジャを押すことにより用時適用部位に注入できる。

## 【使用目的又は効果】

根管及び歯周ポケット等への薬剤注入器

## ※【使用方法等】

【使用方法】

- (1) キャップを外し、ゆっくりと薬剤を吸引する。
- (2) ノズルは、ねじ切り部にそって本体に十分締めつける。
- (3) ノズルから薬剤が出ることを確認する。
- (4) 使用後は、ノズルを廃棄する。シリンジは十分洗浄するか、廃棄する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- (1) ピストンを無理に引かないこと。
- (2) ピストンがなめらかに動かない場合は、付属の潤滑油をスポンジに含ませ、先端ゴムに塗布して使用すること。また、潤滑油は一般医療機器に汎用されているシリコン油であるが、塗布しすぎないこと。
- (3) 専用ノズル以外のノズルを使用すると、注入時に外れる可能性があるので使用しないこと。
- (4) 使用時には毎回、必ずノズルが本体に締めつけてあるか確認すること。
- (5) 薬剤が漏れることがあるので、ノズルは十分締めつけること。
- (6) 薬剤を強い力で押し出さないこと。

## 【使用上の注意】

- (1) 使用の際は、ノズル及びシリンジをアルコールで清拭・消毒すること。
- (2) 使用後は、シリンジ内に薬剤が残留した状態で保存しないこと。
- (3) ノズル及びシリンジに異常が見られた場合は使用しないこと。
- (4) 本書に記載の用途以外には使用しないこと。
- (5) 本機器は、医療有資格者以外は使用しないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 室温保存
- (2) 直射日光を避けて保管すること。
- (3) 0℃以下で保管すると、クラックが入ることがあるので注意すること。
- (4) 本機器は、医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

## ※【包装】

シリンジ	2本
ノズル	50本（10本×5）
潤滑油	1本
スポンジ	1個

## ※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジーシー昭和薬品

住所：〒174-8585 東京都板橋区蓮沼町76番1号

電話番号：0120-648-914

〈受付時間〉9:00～17:30（土・日・祝日・弊社休日を除く）

製造業者：株式会社ジーシー

※※

GC

製造販売元

株式会社ジーシー昭和薬品

東京都板橋区蓮沼町76番1号