

## 機械器具48 注射筒

一般医療機器

歯科麻酔用注射筒

JMDN 35969000

オーラ<sup>®</sup>注用「1.8Eシリンジ」吸引タイプORA<sup>®</sup> Injection「1.8E Mechanically safeguarded syringe」

## 【警告】


- (1)本器具は患者ごとに洗浄・滅菌すること。
- (2)針やカートリッジは、患者ごとに交換すること。

## 【禁忌・禁止】

- (1)本器具を二次的加工(改造)しないこと。
- (2)劣化や異常が見られた場合は、本器具の使用を中止すること。
- (3)注射針の取り付けは、カートリッジ装填後に行うこと。  
[液漏れが発生することがある。]

## 【形状・構造及び原理等】

## 【形状・構造】

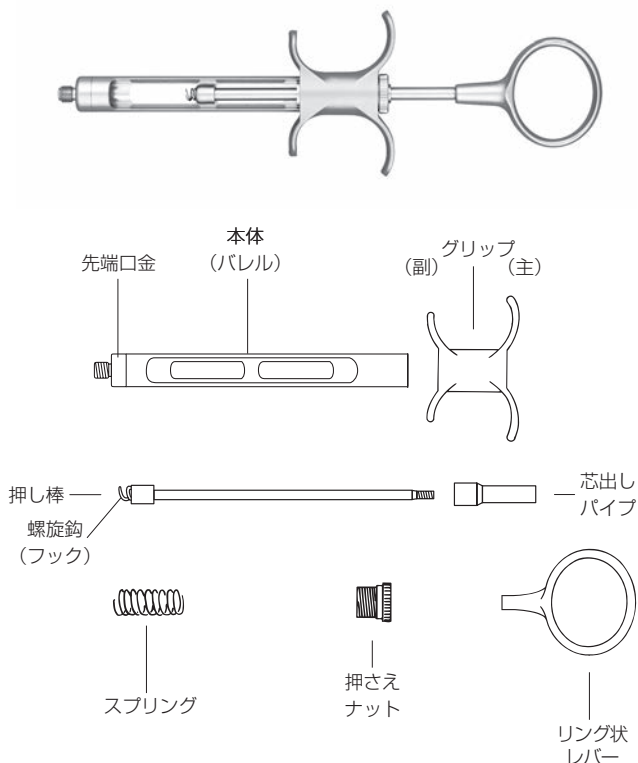

## 【原理】

薬剤の入ったカートリッジを装填し、市販の注射針を先端口金に取り付け、リング状レバーを押して薬剤を注入できる。リング状レバーにより、吸引が可能である。

## 【機能試験】

| 規格            | 試験方法   |
|---------------|--|
| 押し棒がスムーズに動くこと | 先端口金を下に向けて垂直に保持し、押し棒をいっぱい引き出し倒立させるとき、押し棒は自由かつ滑らかに動く。 |
| 押し棒先端にプレのないこと | 押し棒を本体奥まで押し込んだとき、押し棒の先端のプレは1mmを超えない。                 |


## 【使用目的又は効果】

歯科用局所麻酔剤「オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL」ほか、市販の1.8mL製剤に使用するシリンジである。市販の注射針を組み合わせる使用とする。


## 【使用方法等】

## 【使用方法】


- (1)注射針を取り付ける前にリング状レバーを一杯に引き、カートリッジ後部から装填する。

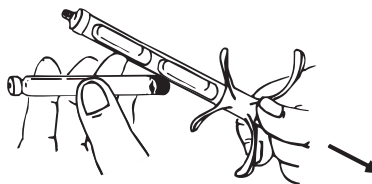


- (2)カートリッジを指で押さえ、リング状レバーを軽く押しながら右に1～2回転させ、螺旋鈎(フック)をカートリッジのプランジャゴム栓に食い込ませる。

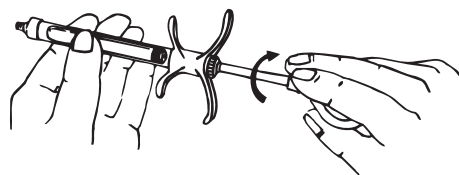


- (3)注射針を取り付ける。

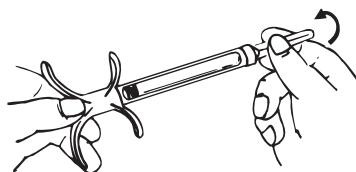

(4) 液を2～3滴、滴下させた後、注射を行う。

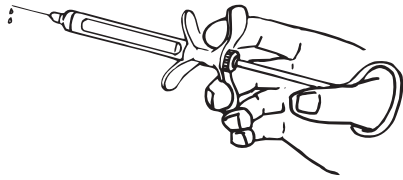

(5) 注射が完了したら針を外し、カートリッジを指で軽く押えながら、リング状レバーを左に回転させて螺旋鉤(フック)をプランジャゴム栓から外す。リング状レバーを一杯に引き、カートリッジを取り出す。

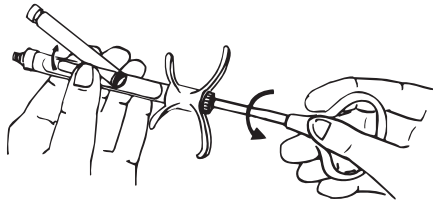

#### 〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- (1) 本器具と適合しない注射針及びカートリッジは使用しないこと。
- (2) 本体の向きを変える時は、押さえナットをわずかに緩めてから行うこと。

#### 【使用上の注意】

- (1) 本器具を滅菌する場合は、血液、唾液、酸及び麻酔液等の残渣は十分に洗浄すること。また、弱酸性水で洗浄した後は、十分水洗いすること。
- (2) 本器具は、オートクレーブ(121℃、20分)、乾熱滅菌(180℃)等の滅菌法が可能であるが、滅菌を繰り返すことにより表面が変色することがある。
- (3) 本器具先端口金内部に異物(錆等)が付着すると、カートリッジのディスク(ゴム)との密着性が悪くなり、液漏れが発生することがあるので、使用後は先端内を点検し、異物等を十分洗浄すること。
- (4) 長期間使用すると、押し棒と本体部分の金属磨耗によりプレが大きくなり、カートリッジの破損や液漏れが発生することがある。この場合は使用を避けること。
- (5) 本器具を分解洗浄した後は、押さえナットのネジ合わせを正確に行い、本器具が正常に作動することを確認すること。
- (6) カートリッジの装填及び取り出し、本器具の洗浄及び滅菌時には、螺旋鉤(フック)の先端に十分注意して取り扱うこと。
- (7) 本書に記載の用途以外には使用しないこと。
- (8) 本器具は、医療有資格者以外は使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 〈保管方法〉

- (1) 直射日光を避け、清潔な場所に保管すること。
- (2) 本器具は、医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

#### 【包装】

1 本入

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジーシー昭和薬品

住所：〒174-8585 東京都板橋区蓮沼町76番1号

電話番号：0120-648-914

〈受付時間〉9:00～17:30 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

製造業者：株式会社ジーシー



製造販売元

株式会社 ジーシー昭和薬品

東京都板橋区蓮沼町76番1号

0065C-23UCA