

根管形成潤滑材

リムエード

REAM-AID

本品の使用により

- (1) 根管形成の時間が著しく短縮できます。
- (2) 根管穿通できなかったケースもできるようになります。
- (3) オーバーインストルメンテーションを防ぎます。
- (4) 粘性も加味されていますから感染菌質の切削片をファイルに粘着させて取り出せるもので、切削片が根尖孔外に出ることを防ぎます。
- (5) わん曲根管も容易に根管形成できます。
- (6) 理想的なアピカルシート形式に際し、そのインストルメンテーションのコントロールが容易になります。
- (7) 根管壁がスムーズになるので加圧充填が容易になります。
- (8) 歯質や根尖部組織に為害作用はありません。
- (9) 水によく溶けるので常法の洗浄操作により、簡単に除去できます。

【組成・性状】

〈組成〉

(食添) ポリアクリル酸ナトリウム、(日局) メチルセルロース、
(日局) プロピレングリコール、(食添) 食用青色1号アルミレーキ、
などからなっています。


〈性状〉

滑らかな、青色の軟膏様物質

【適応】

リーマー、ファイルの操作性補助

【使用方法】

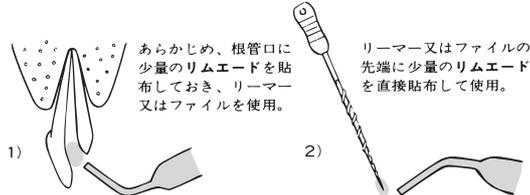

【取扱い上の注意】

〈注意〉

- ご使用後は必ずゴムキャップをして下さい。
- もしキャップをせずに先端が固まったときは、少し切り取って下さい。
- 紫外線殺菌キャビネットには入れないで下さい。
- ご使用の際には、先端をアルコール綿等で清拭下さい。

【包装】

2g

【製品情報お問い合わせ先】

株式会社ジーシー昭和薬品
〒113-0033 東京都文京区本郷一丁目28番34号
TEL 0120-648-914
<受付時間> 9:00～17:30 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

製造販売元



株式会社 ジーシー昭和薬品
東京都板橋区蓮沼町76番1号